

İÇERİK:

- 1 adet polipropilenden yapılmış irrigatör kabı (1)
- 1 adet hortum bağlantı adaptörü – çıkış (2)
- 1 adet silikondan yapılmış irrigatör hortumu (3)
- 1 adet polioximetilenden yapılmış musluk (4)
- 1 adet büyük boy polietilen vajinal uç (5)
- 1 adet küçük boy polietilen lavman ucu (6)
- 1 adet metal askı (7)



KULLANIM AMACI:

Bu ürün, sıvı ile yıkama yoluyla rektumun ve daha derin bağırsak bölümlerinin kapsamlı temizliği için kullanılır.

KONTRENDİKASYONLAR / KULLANIM DIŞI DURUMLAR:

Aşağıdaki durumlarda ürün sadece doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır:

Hamilelik, anal fissürler, anal apse veya anal bölgede diğer iltihaplanmalar, hemoroid, bağırsak tıkanıklığı (ileus), bağırsak kanamaları, vajinal kanamalar.

KULLANIM ORTAMI:

İrrigatör kabı, hijyenik koşullar sağlandığı sürece her yerde kullanılabilir.

KULLANIM TALİMATLARI:

1. Kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
2. Tüm parçaların sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.
3. İlk kullanım öncesi ürünü, temizlik talimatlarına uygun şekilde temizleyiniz.

TEMİZLİK VE HAZIRLIK:

4. Silikon hortumu (3), irrigatör kabının (1) bağlantı parçasına tamamen vidalayınız.
 5. Musluğu (4), hortumun (2) serbest ucuna takınız.
 6. Kullanım amacına göre, anal kullanım için lavman ucunu (6) veya vajinal kullanım için vajinal ucu (5) musluğa (4) vidalayınız.
 7. İrrigatör kabını (1) ılık ve temiz musluk suyu ile doldurunuz. Bulunduğunuz yerdeki su kalitesine dikkat ediniz. Herhangi bir ek madde veya özel yıkama solüsyonu yalnızca doktor veya eczacı tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
 8. Hortumdaki (3) havayı boşaltmak için musluğu (4) açınız. Su akmaya başladığında musluğu tekrar kapatınız.
 9. Nötr bir krem veya kayganlaştırıcı jel bolca sürünüz. Daha konforlu bir kullanım için rektal uç kullanılması tavsiye edilir. Uygun ucu (lavman veya vajinal uç) yaklaşık 5–7 cm kadar yerleştiriniz.
 10. Musluğu (4) açarak veya kapatarak sıvı akışını kontrol ediniz.
- Kabın yüksekliği, basınç veya sıvının akış hızını etkileyebilir.
- Kabı örneğin kuvvet kenarına koyabilir veya metal askı (7) ile asabilirsiniz.